



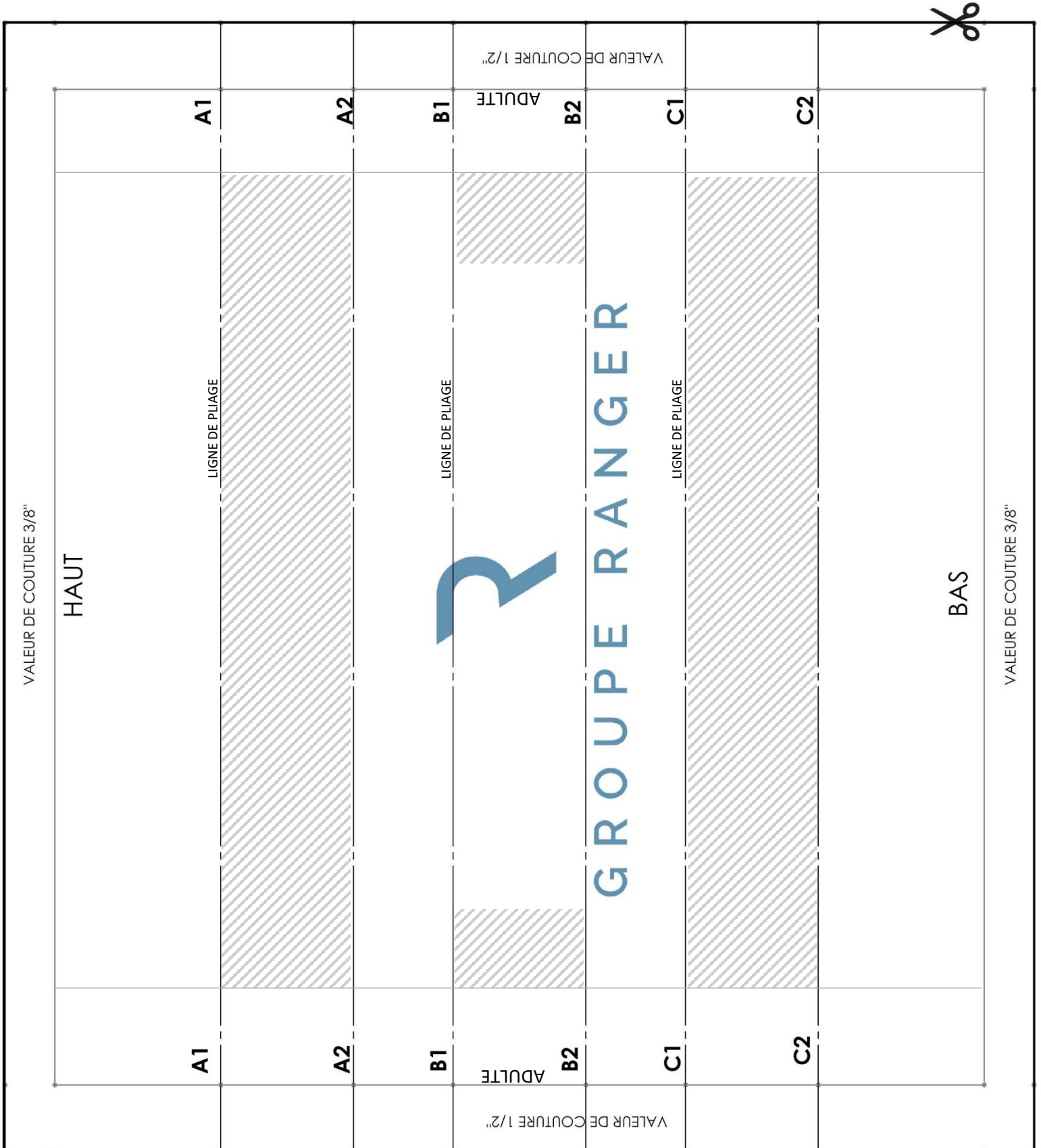


GROUPE RANGER

Merci de votre achat! Vous trouverez, ci-joint, un tutoriel qui vous permettra de confectionner vos masques vous-mêmes, avec une machine à coudre domestique. Soyez conciliant, nous nous sommes empressés de mettre ce projet en marche afin d'aider le plus de gens possible à obtenir des masques, voyant la pénurie de matériaux actuelle.

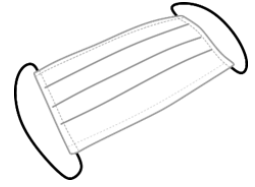


Fabriquer des masques de protection soi-même : tutoriel facile !

Étape 1 : Découpage du gabarit

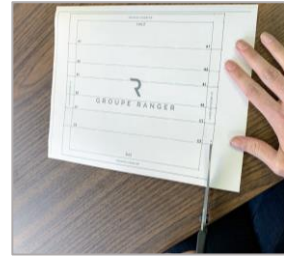

Étape 2 : Marquage des emplacements des plis

- Déposez le gabarit sur le matériel.
- À l'aide d'une craie ou d'un crayon de bois, marquez les emplacements des plis (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Ils serviront pour la conception des plis.
- Répétez l'étape pour l'autre côté.

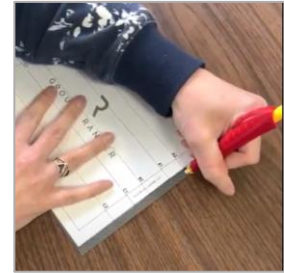


Étape 3 : Préparation du haut et du bas du masque

- Pliez un ourlet de 3/8" sur une des longueurs en insérant la broche fournie. Il est important de bien la centrer. Faites une couture droite. Ce sera le haut du masque.
- Répétez la même opération de l'autre côté, mais SANS broche. Ce sera le bas du masque.



Étape 4 : Fabrication des plis

- Pliez le tissu de façon à mettre le cran A1 sur le cran A2. Faites une petite couture pour former le 1^{er} pli.
- Pliez le tissu de façon à mettre le cran B1 sur le cran B2. Faites une petite couture pour former le 2^e pli.
- Pliez le tissu de façon à mettre le cran C1 sur le cran C2. Faites une petite couture pour former le 3^e pli.
- Répétez les mêmes opérations pour l'autre côté.

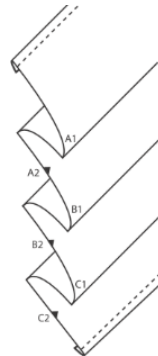

Étape 5 : Préparation des côtés avec les élastiques

- Prenez le gabarit et indiquez les emplacements des valeurs de couture (celles de gauche et celles de droite de 1/2"). Ceci servira de référence pour faire vos plis.
- Repliez un des côtés en faisant un ourlet de 1/2".
- Insérez un élastique fourni dans l'ourlet.
- Faites une couture et prenez bien soin de ne pas coudre sur l'élastique.
- Répétez les mêmes opérations pour l'autre côté.



Étape 6 : Nouage des élastiques selon la grandeur désirée

- Nouez les élastiques et coupez l'excédent.
- Faites glisser la bande élastique jusqu'à temps que le nœud soit caché dans l'ourlet.

Félicitations! Vous avez maintenant de nouveaux masques.

